



# O MAR VAI CUIDAR AINDA MAIS DE SI

UMA GAMA MAIS COMPLETA, COM MAIS BENEFÍCIOS



## O PODER NATURAL DA ÁGUA DO MAR



Ref.: 170.2014

### COMPOSIÇÃO

Solução hipertónica de água do mar com sais minerais naturais. Tem um equivalente a 2,36% de solução de NaCl (cloreto de sódio). Não tem conservantes.

### INDICAÇÕES

**OtoLyomer® C** consiste numa solução hipertónica de água do mar controlada microbiologicamente e sem conservantes, especialmente indicado na limpeza do canal auditivo externo e na sua manutenção regular. **OtoLyomer® C** permite:

- limpar o canal auditivo pela remoção de sujidade e do excesso de cera
- prevenir a formação de rolhão de cera

**OtoLyomer® C** está equipado com uma cânula desenhada para se adaptar e não traumatizar o canal auditivo, e uma válvula de um só sentido para prevenir a contaminação bacteriana da solução.

Com este sistema de micro-difusão em spray, e o seu frasco de "bolso", com fluxo contínuo, para utilizar em todas as posições, **OtoLyomer® C** permite uma limpeza dinâmica do canal auditivo externo.

### MECANISMO DE AÇÃO

1 a 2 pulverizações em cada ouvido, 2 a 3 vezes por semana. Não utilizar em caso de otite e perfuração do tímpano.

É recomendado o aconselhamento médico para pessoas que sofram de doença crónica ou aguda do canal auditivo externo. Para pessoas que utilizem um aparelho auricular, o spray pode ser utilizado na limpeza do ouvido após a remoção da prótese. Pode ser utilizado a partir dos 6 anos de idade.

### COMO UTILIZAR

- remover a tampa protetora da cânula
- inserir cuidadosamente a cânula no ouvido
- fazer uma curta e leve pressão de forma a sair solução
- fazer massagem externa sobre o ouvido durante alguns segundos
- inclinar a cabeça para limpar os vestígios de água
- limpar os vestígios da água, do cerúmen e impurezas que saírem e secar com uma toalha
- repetir o processo no outro ouvido
- após cada utilização limpar a cânula com água quente

### PRECAUÇÕES PARTICULARES

- recipiente sob pressão. Proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a 50° C. Não furar ou queimar, mesmo após utilização final.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilizar se a data de validade indicada na embalagem estiver ultrapassada.
- Se o frasco estiver danificado, aberto ou perfurado, não o utilize e deite-o fora imediatamente, pois há o risco de contaminação.

Data da revisão: Maio 2014

Distribuído em Portugal por:  
**JABA RECORDATI, S.A.**

Lagoas Park, Edifício 5, Torre C, Piso 3, 2740-298 Porto Salvo

Capital Social de 2.000.000,00 Euros, Contribuinte n° 500492867 matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo número.

