

ALOCAIR® PLUS SOLUÇÃO BUCAL - FOLHETO INFORMATIVO

Aloclair® Plus Solução bucal forma uma película protectora que adere à cavidade oral como uma barreira mecânica que cobre as zonas afectadas, aliviando a dor causada pela exposição das terminações nervosas.

Aloclair® Plus Solução bucal favorece a cicatrização e contribui para o alívio da dor causada por pequenas lesões na boca tais como estomatites aftosas, úlceras aftosas e lesões traumáticas causadas por aparelhos de ortodôncia ou próteses dentárias. Está também indicado para úlceras aftosas difusas. O Ácido Hialurónico e o Aloé Vera presentes na formulação favorecem o processo natural de cicatrização dos tecidos danificados.

Modo de Utilização: Encher o copo doseador até à marca de 10 ml. Bochechar durante pelos menos um minuto antes de expelir a solução. Utilizar 3-4 vezes ao dia ou segundo a necessidade. Aloclair® Plus Solução bucal é inócuo se ingerido.

Componentes: água, polivinilpirrolidona (PVP), maltodextrina, propilenoglicol, aloé barbadensis, hidroxietilcelulose, sorbato de potássio, benzoato de sódio, PEG-40 óleo de castor hidrogenado, EDTA dissódico, cloreto de benzalcónio, hialuronato de sódio, aroma, sacarina sódica, glicirrizato dipotássico.

Advertências: O uso de Aloclair® Plus Solução bucal está contra-indicado em pessoas com antecedentes de hipersensibilidade a algum dos seus componentes.

Precauções de utilização: Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar directa.

Apresentações: 60 ml

Aloclair® é uma marca registada de Sinclair Pharmaceuticals Limited.

CE0477

Fabricante:
Sinclair Pharma Srl
Viale Restelli 29
20124 Milão, Itália

Distribuído por:
Jaba Recordati, S.A.
Lagoas Park, Ed. 5, Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo, Portugal