

# Alobaby®

## Primeiros Dentes

**Alobaby® Primeiros Dentes** gel para utilização oral, bioadesivo, que forma rapidamente uma película invisível sobre a zona afetada, a qual vai proteger a gengiva do desconforto e dor causados pela erupção dos primeiros dentes do bebé/criança.

**Alobaby® Primeiros Dentes** com componentes de origem natural, ajuda a diminuir a dor e a vermelhidão nas zonas afetadas.



O aplicador tem umas cerdas de silicone que permitem massajar suavemente a gengiva proporcionando um alívio agradável do desconforto e de todos os sintomas relacionados com a erupção dos primeiros dentes.

**Alobaby® Primeiros Dentes** não contém anestésico local, substâncias de natureza farmacológica, álcool e açúcar.

**Alobaby® Primeiros Dentes** não arde quando aplicado e tem um sabor agradável a banana.

**Instruções de utilização:** aplicar uma quantidade suficiente de produto de forma a cobrir a zona afetada, e massajar delicadamente a gengiva com o aplicador.

Utilizar de preferência após as refeições e antes de dormir, de modo a facilitar a formação da película e prolongar o alívio para o bebé/criança. Utilizar de acordo com as necessidades. Depois de utilizar, fechar com a tampa de rosca.

Antes de cada aplicação, remover qualquer resíduo de gel que possa obstruir o fluxo de saída do mesmo.

**Composição:** água, PVP, maltodextrina, propilenoglicol, PEG-40 óleo de ricino hidrogenado, aloé vera, goma xantana, aroma, sorbato de potássio, benzoato de sódio, EDTA dissódico, hialuronato de sódio, xilitol, cloreto de cetilpiridínio, ácido glicirretínico, açafraão.

**Contraindicações:** Cada tubo de **Alobaby® Primeiros Dentes** deve ser utilizado por um único paciente, para evitar a contaminação cruzada do aplicador e gel.


A utilização de **Alobaby® Primeiros Dentes** é contraindicada em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes.

## Precauções e advertências:

### ATENÇÃO

- O produto deve ser unicamente aplicado por uma pessoa adulta.
- Este produto não é um brinquedo. Não deixar nas mãos do bebé/criança para evitar o risco de asfixia.
- Antes de utilizar **Alobaby® Primeiros Dentes** verifique se o produto não apresenta sinais de ter sido já utilizado, e preste atenção durante a aplicação do gel para que não ocorra o desprendimento accidental de qualquer das partes constituintes da cabeça do aplicador. Caso ocorra, suspenda imediatamente a sua utilização. Não tente colocar no lugar as peças que se desprenderam.
- Suspenda a utilização do dispositivo caso o gel já tenha acabado.

Não utilizar o produto se o tubo estiver aberto ou danificado. Conserve à temperatura ambiente e afastado de qualquer fonte de calor. Não utilize depois de ultrapassada a data de validade do produto. Manter longe do alcance das crianças.

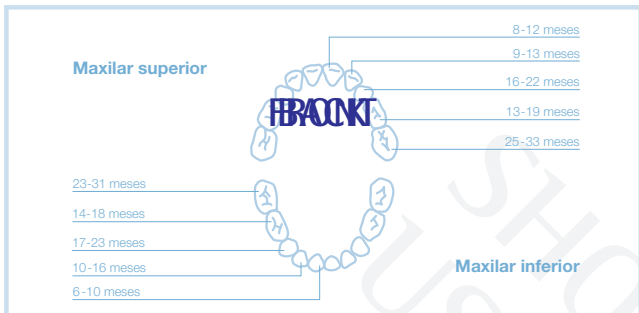

**Conteúdo:** 10 ml



#### Fabricante:

Alliance Pharma srl  
Viale Restelli 5, 20124 Milão, Itália

#### Distribuído em Portugal por:

Jaba Recordati, S.A.  
Av. Jacques Delors  
Ed Inovação 1.2, Piso 0 - Taguspark  
2740-122 Porto Salvo  
Portugal

ALLIANCE



JABA RECORDATI

0373

**REF**

ALOVDEN10MLJABA TR1817830