

Aloclair® Plus

GEL

Alívio rápido da dor
e cicatrização das AFTAS

Aloclair® Plus Gel actua formando uma película protectora na cavidade oral que cobre as terminações nervosas expostas da lesão (aftas), evitando assim as irritações posteriores e reduzindo a dor. O Ácido Hialurónico (elevado peso molecular) e o Aloé Vera presentes na formulação favorecem o processo natural de cicatrização dos tecidos danificados.

Aloclair® Plus Gel é indicado para úlceras aftosas, estomatites aftosas, pequenas lesões, zonas de atrito/fricção ou úlceras traumáticas causadas por aparelhos ortodónticos ou próteses dentárias e também lesões de origem cirúrgica.

Aloclair® Plus Gel é adequado para utilização em adultos e crianças de todas as idades.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar 1 ou 2 gotas de gel para cobrir a totalidade da úlcera ou lesão bucal. Evitar o contacto directo do aplicador com a lesão. Não tocar com a língua na lesão durante pelo menos 2 minutos para dar tempo à formação de uma película protectora. Para melhores resultados, evitar comer ou beber durante pelo menos 1 hora após aplicação. Fechar a tampa após cada aplicação. Aplicar 3-4 vezes ao dia ou segundo a necessidade.

COMPOSIÇÃO:

água, polivinilpirrolidona (PVP), maltodextrina, propilenoglicol, PEG-40 óleo de ricino hidrogenado, goma xantana, sorbato de potássio, benzoato de sódio, hialuronato de sódio, aroma, cloreto de benzalcónio, EDTA dissódico, sacarina sódica, glicirrizato dipotássico, aloé barbadensis.

ADVERTÊNCIAS:

Cada tubo de **Aloclair® Plus Gel** deve ser utilizado por apenas um doente para evitar contaminação cruzada do aplicador e do gel. O uso de **Aloclair® Plus Gel** está contra-indicado em pessoas com antecedentes de hipersensibilidade a algum dos seus componentes. Se sofre frequentemente de aftas procure aconselhamento médico.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada. Conservar à temperatura ambiente, afastado de fontes de calor directo. Não congelar. Manter fora do alcance e da vista das crianças.

CONTEÚDO

8 ml

Aloclair®, Alliance e dispositivos associados são marcas comerciais do grupo Alliance Pharma PLC.

CE 0477

FABRICANTE:

 ALLIANCE

Alliance Pharma Srl
Viale Restelli 5
20124 Milão
Itália

DISTRIBUÍDO EM PORTUGAL POR:

 JABA RECORDATI
GROUP

Jaba Recordati, S.A.
Av. Jacques Delors
Ed Inovação 1.2, Piso 0 - Taguspark
2740-122 Porto Salvo
Portugal

REF ALOPLUSGEL8MLJAB

EP 1313689
Rev 04/2020
TR1817974
0ALL2FI00093